




**1**



**Matériel nécessaire:**  
1 kit eSwab  
bouchon **rose**/écouvillon standard  
(cervix, plaies...)  
ou  
1 kit eSwab  
bouchon **bleu**/écouvillon fin  
(nasopharynx, urètre).

**2**

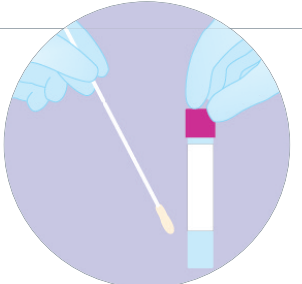


Effectuer le frottis  
comme d'habitude.

**3**




Après réalisation du prélèvement,  
déposer l'écouvillon dans le tube  
de transport.

**4**

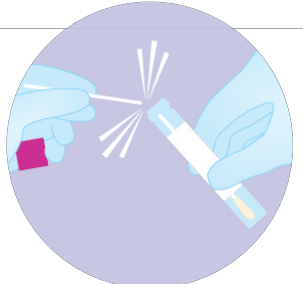


Une zone de fracture permet  
de casser aisément l'écouvillon.

**5**

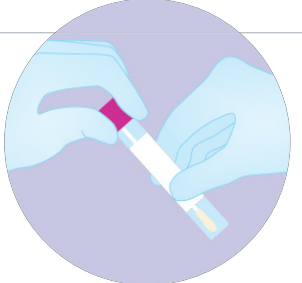


Laisser l'écouvillon dans le tube  
et revisser soigneusement  
le capuchon.  
Kits **bleus**: il est normal  
que la tige de l'écouvillon  
dépasse du tube;  
ne pas hésiter à refermer quand  
même le bouchon, la tige  
se pliera dans le tube.

**6**

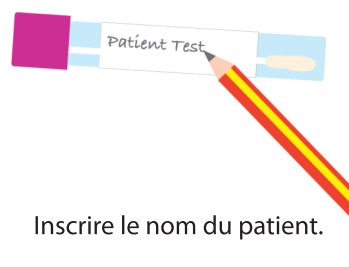


Inscrire le nom du patient.

**7**



Le prélèvement peut être conservé  
24 h à température ambiante

**8**



Apporter le prélèvement au laboratoire.